

# DOSIERTABELLE

## für das Instrumentendesinfektionsmittel

### Descogen I

sporozid wirksam		
1,50%	ml	EWZ
1l	15 ml	60 min
2l	30 ml	60 min
4l	60 ml	60 min
8l	120 ml	60 min
10l	150 ml	60 min
20l	300 ml	60 min

bakterizid, levurozid, viruzid wirksam		
1,50%	ml	EWZ
1l	15 ml	15 min
2l	30 ml	15 min
4l	60 ml	15 min
8l	120 ml	15 min
10l	150 ml	15 min
20l	300 ml	15 min

Anwendung: Wasser in einem Behältnis vorlegen. Mit dem Messbecher benötigtes Volumen abmessen und hinzufügen.  
 Mehrmals umrühren. Die gebrauchsfertige Lösung hat eine Standzeit von 12 h.  
 30 ml entsprechen 30 g



**Antiseptica chem.- pharm.- Produkte GmbH** Carl-Friedrich -Gauß-Str. 7, D-50259 Pulheim Tel. 0 22 34/9 84 66-0, Fax DW-11 info@antiseptica.com www.antiseptica.com  
**Antiseptica Austria** Wehlistraße 150 Top 61 1020 Wien Tel.01-374 66 00 Fax:DW 66 office@antiseptica.at www.antiseptica.at